

cetron®

Erhältlich in
der Apotheke!



Reinigungsprodukt

für Zahnsperren, Schienen, Zahnersatz
und Sportmundschutz

SCHEU
SCHEUGROUP

Die richtige Pflege

von Zahnsparngen, Schienen, Zahnersatz und Sportmundschutz

Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Schienen, Spangen und Prothesen im Laufe der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen.



Mit CETRON®

professionell reinigen und pflegen

Mit dem **CETRON® Reinigungs-Pulver** erhalten Sie ein optimales Reinigungsmittel, das im Handumdrehen dauerhaft reinigt. Es können alle* prothetischen und kieferorthopädischen Apparaturen gereinigt, von Ablagerungen befreit und aufgefrischt werden.

* Nicht geeignet für Polyamide z.B. Valplast oder bre.flex.




Praktische 15g-Portionsbeutel für den Patientengebrauch.


Einfache Anwendung



① Inhalt eines Beutels mit ca. 150 ml Wasser mischen, Reinigungsobjekt unter fließendem Wasser abspülen und einlegen.

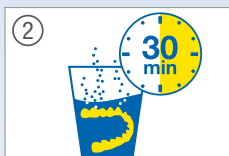

② Ca. 30 min. einwirken lassen. Lösung kann 3 bis 4 Tage verwendet werden.

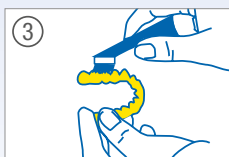

③ Gelöste Beläge mit Bürste entfernen und Objekt erneut abspülen.

Überreicht von:

