

Pflege- und Reinigungsprodukte

für Zahnspangen, Schienen, Zahnersatz und Sportmundschutz



Inhalt eines Beutels mit ca. 150 ml Wasser mischen.



Ca. 30 min. einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.



Gelöste Beläge können mit Bürste und Zahnpasta gereinigt werden.



Vor dem Einsetzen pflegt und erfrischt das Spray.

Der Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken, Medikamenten sowie das individuelle Mundmilieu führen bei Schienen, kieferorthopädischen Apparaturen und Prothesen im Laufe der Tragezeit zu Ablagerungen, Verfärbungen oder Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen. Mit CETRON® erhalten Sie bzw. Ihre Patienten ein optimales Reinigungsmittel, das im Handumdrehen dauerhaft reinigt und pflegt. Die preiswerte Lösung sorgt für langen Tragekomfort und hohe Patienten-Compliance. Es können alle prothetischen und kieferorthopädischen Arbeiten gereinigt, von Ablagerungen befreit und aufgefrischt werden.

Lieferprogramm

// CETRON® Pflegeset	1 Reinigungsdose und 5 Portionsbeutel (15 g)	3236.1
// Nachfüllpackung	5 Portionsbeutel (15 g)	3237.1
// Nachfüllpackung	25 Portionsbeutel (15 g)	3237.2
// Nachfüllpackung	250 Portionsbeutel (15 g)	3237.3
// CETRON® Pflegespray	75 ml	3238.1